

Gebruiksaanwijzing

SaltDome voor ultrasone zouttherapie



Conformiteitsverklaring:

Het apparaat is vervaardigd en gecontroleerd volgens een managementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 9001 en voldoet aan alle aspecten van de overeengekomen specificatie volgens de Europese vereisten.

Fabrikant: J&R Electronics Co, China Technische ondersteuning.



Gefeliciteerd met uw aankoop van het SaltDome ultrasone zouttherapieapparaat

Het SaltDome-apparaat voor zouttherapie is ontworpen voor thuisgebruik. Het maakt gebruik van ultrasone verstuviging om een damp van zoutoplossing te creëren in het reservoir, dat zoutdeeltjes met een grootte van 1 tot 5 micron bevat. Deze deeltjes kunnen alle delen van de longen bereiken.

De zoutmoleculen (NaCl) op de wanden van de luchtwegen hebben een osmotisch effect, waardoor afscheidingen worden opgelost en gemakkelijker kunnen worden afgevoerd. Door de luchtwegen vrij te maken, worden bacteriën, virussen en schimmels beter bestreden, ontstekingen verminderd en indirect de zuurstofvoorziening verbeterd en de ademhaling vergemakkelijkt.

Het is bewezen dat zouttherapie helpt bij het voorkomen van aandoeningen aan de luchtwegen. Het beschermt zeker tegen allergieën van de bovenste luchtwegen, zelfs tegen verkoudheid en griep (maar garandeert niet dat u niet ziek wordt).

Bij chronische aandoeningen van de luchtwegen (COPD, astma, cystische fibrose, enz.) kan het worden gebruikt als aanvullende therapie bij medische behandeling.

Het helpt bij het verlichten van allergische symptomen van de bovenste luchtwegen.

De SaltDome levert zoute lucht en negatieve ionen die niet alleen de conditie van de luchtwegen verbeteren, maar ook gunstig zijn voor de werkefficiëntie en concentratie.

Het SaltDome-zouttherapieapparaat wordt geleverd met een netadapter, handleiding, mengbeker en dispenser. Optioneel verkrijgbaar in Parajdi of Himalaya natuurlijk steenzout. Deze zouten hebben een NaCl-gehalte van 97-98%, dus u kunt hetzelfde effect verwachten. Elk additiefvrij steenzout kan met het apparaat worden gebruikt.

De SaltDome-tool is eenvoudig te gebruiken. Sluit hem aan, vul de tank met pekels en gebruik hem.

Om van zouttherapie te profiteren, moet u een paar uur per dag in de zoute lucht doorbrengen.

Wij raden u aan het apparaat 's nachts te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u slaapt, naast uw bed, op het nachtkastje, zodat u kunt genieten van de voordelen van natuurlijk zout.

Als u een zittend beroep heeft, kunt u het apparaat ook op uw bureau gebruiken.


Zouttherapie is niet effectief als het apparaat thuis werkt, maar u en uw gezinsleden niet thuis zijn.

Hoe dichterbij het apparaat u staat, hoe effectiever het is. Hoe verder het apparaat van u verwijderd is, hoe minder heilzaam zout er in uw longen terechtkomt.

De ventilator van het apparaat maakt minimaal geluid. Voor de meeste mensen is dit niet storend. Als u last heeft van een zacht gezoem, plaats het apparaat dan verder weg, maar houd er rekening mee dat hoe verder u het apparaat wegplaatst, hoe minder efficiënt het zal zijn.

Voor het beste resultaat raden wij regelmatig (dagelijks) en langdurig (minimaal 2-3 weken) gebruik aan.

Details van het apparaat

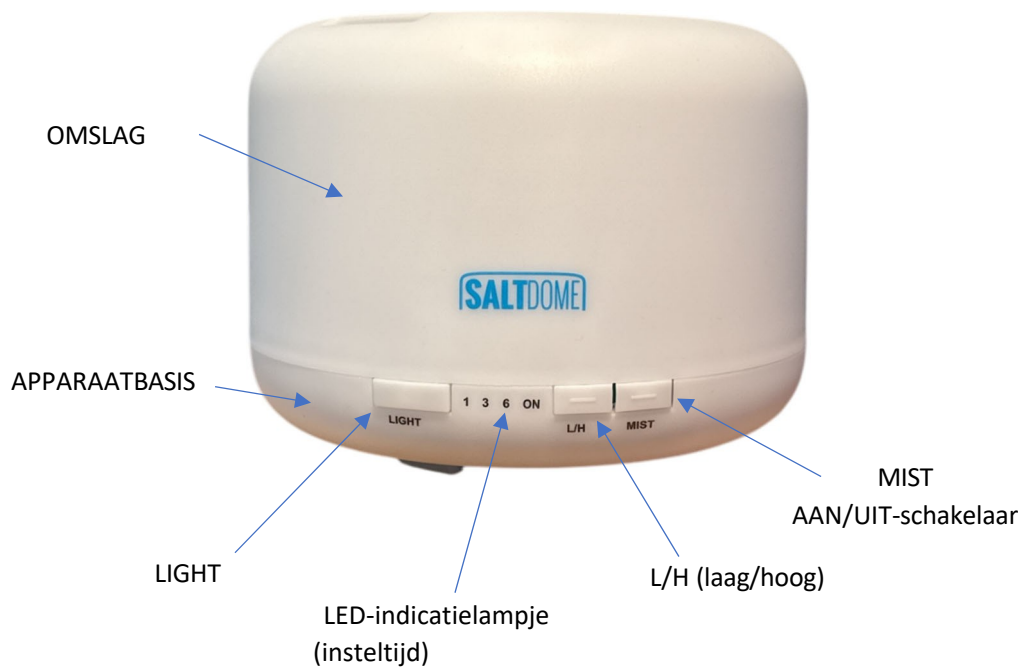

Afstandsbediening

Het apparaat kan ook met een afstandsbediening worden bediend.



Gebruik

1. Plaats het apparaat op een horizontaal, stabiel en droog oppervlak waar het zal worden gebruikt (nachtkastje) en verwijder de bovenklep. **(FIG1)**
Leg geen tafelkleed of ander textiel onder het apparaat, omdat dit de luchtventilatie kan blokkeren.
2. Steek de stekker van de voedingsadapter in de aansluiting aan de onderkant van het apparaat. **(FIG2)**
3. Los 1 schepje (1 gram) steenzout (NIET MEER!) op in 500 ml (een halve liter) water **(FIG4)**.
4. Giet de bereide pekkel in de watertank, die zich vervolgens zal vullen. Het waterpeil mag het maximale niveau niet overschrijden. **(FIG5)**
Als de waterkolom te hoog is, kan de ultrasone cel geen vochtigheid produceren en raakt de tank niet leeg.
5. Het is normaal dat er vuil op de bodem van de tank achterblijft nadat het zout is opgelost. Steenzout is natuurlijk en ongeraffineerd. Het is niet gevaarlijk voor u!
Giet geen water in een apparaat dat al aan staat!
Als het kraanwater hard is of chloor bevat, gebruik dan onthard of gebotteld water.
6. Voor medicinale doeleinden is het voldoende om 1 lepel (1 gram) steenzout op te lossen. Meer is niet nodig! Een sterker effect wordt niet verwacht door meer zout, maar door meer tijd in de zoute lucht door te brengen.
7. Plaats de bovenklep en draai de uitlaat in de gewenste richting.
8. Steek de stekker in het stopcontact. **(FIG6)**
9. Druk op de MIST-knop om het apparaat in te schakelen. **(FIG9)**
Het apparaat schakelt alleen in als er pekkel in de tank zit. Het LED-lampje "1 uur" dat de ingeschakelde status aangeeft, gaat branden en het apparaat begint te werken.
De microscopisch kleine zoutdeeltjes worden via de opening aan de bovenkant uit het apparaat afgevoerd.
Er is hooguit een lichte nevel zichtbaar, en dat is normaal! Er komt slechts zeer weinig damp uit het apparaat.
10. Druk nogmaals op de MIST-knop om de timer in te stellen. De tijd kan worden ingesteld op 1 uur, 3 uur, 6 uur, intermitterend of continu. Na de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit.
In de intermitterende modus werkt de ultrasone cel in een cyclus van 50%-50%, waardoor de uitstoot van nevel wordt verminderd. In de continue modus is er geen timer, dus het apparaat blijft werken totdat de tank leeg is. Door nogmaals op de POWER-knop te drukken, wordt het apparaat uitgeschakeld.
11. L/H (Low/High Vapour) - gebruik de L/H-knop om de hoeveelheid uitgestoten damp te verminderen/verhogen. Het verschil is met het blote oog nauwelijks waarneembaar. Er is een verschil van ongeveer 50% in de dampuitstoot tussen de twee modi. **(FIG8)**
12. LIGHT - door op deze knop te drukken wordt de in het apparaat ingebouwde LED ingeschakeld en verandert de kleur om de paar seconden continu. Als u een kleur mooi vindt, drukt u nogmaals op de knop om deze permanent in te stellen. **(FIG7)**
Als u nogmaals op de LIGHT-knop drukt, worden de kleuren doorlopen. Ten slotte kan het licht worden uitgeschakeld. **(FIG7)**

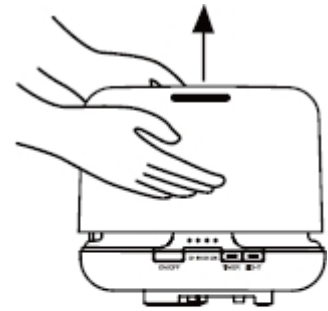


Fig 1

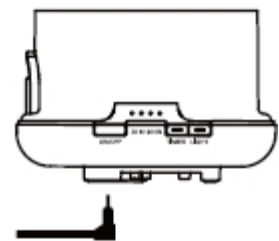


Fig 2

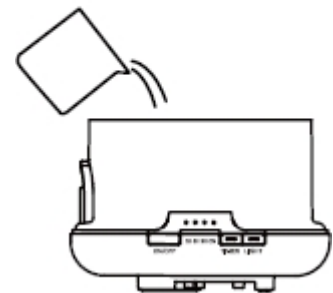


Fig 3



Fig 4

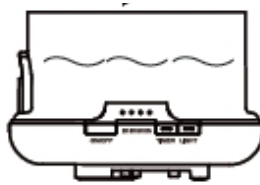


Fig 5

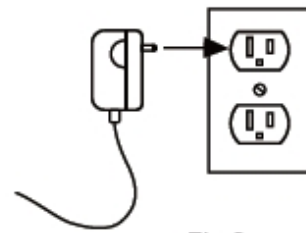


Fig 6

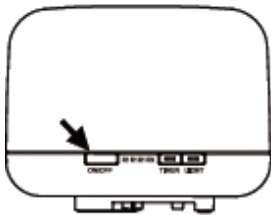


Fig 7

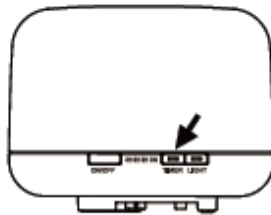


Fig 8

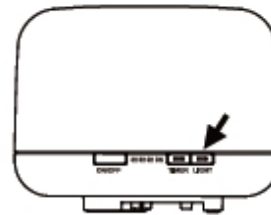


Fig 9

Het apparaat stopt automatisch wanneer er geen pekel meer in de tank zit. Een volledig gevulde watertank raakt na ongeveer 50 uur gebruik leeg. Bij gemiddeld gebruik is dit ongeveer 7 dagen. Om het gebruik te hervatten, vult u de tank opnieuw met pekel.

Zodra het apparaat is opgeladen, mag u het apparaat niet kantelen of verplaatsen en mag u de bovenklep niet verwijderen.

Als er geen water in het waterreservoir zit, klinkt er een pieptoon wanneer u op de knop MIST (Aan) drukt om u eraan te herinneren water bij te vullen.

Het apparaat werkt niet zonder water.

Het wordt aanbevolen om het apparaat gedurende ten minste 10-14 dagen als behandeling te gebruiken. Laat geen water in het apparaat achter wanneer u het niet gebruikt. Leeg het apparaat en bewaar het op een droge plaats.

Onderhoud en reiniging

Reinig het apparaat om de paar dagen als volgt:

1. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet en verwijder het deksel.
2. Giet het resterende water weg aan de kant waar het teken "DRAIN SIDE" staat.
3. Reinig het apparaat met een glas citroenzuur opgelost in lauw water en een zachte doek en veeg het droog met keukenpapier (ontkalken).
4. Reinig de ultrasone cel (kleine ronde verdieping aan de onderkant van het waterreservoir) voorzichtig met een zachte doek.
5. Gebruik nooit andere zuren, enzymen of reinigingsmiddelen, omdat deze storingen kunnen veroorzaken.
6. In de watertank bevindt zich ook een binnendeksel dat kan worden verwijderd om te reinigen. Zoek de hendel en trek het binnendeksel eruit. Na het reinigen plaatst u eerst de luchtuitlaat en drukt u vervolgens op de zijkant van de handgreep tot u een klik hoort.
7. Om het apparaat op te bergen, reinigt u het grondig volgens de instructies. Wanneer het droog is, plaatst u het terug in de originele verpakking en bewaart u het op een koele, droge plaats.

ZEER BELANGRIJK:

Gebruik alleen een zachte doek om de ultrasone cel te reinigen. Raak deze nooit aan met een scherp of hard voorwerp.

Dompel de onderkant van het apparaat NOOIT onder in water en zorg ervoor dat er geen water in de LUCHT- of andere openingen komt.

Verplaats het apparaat na het opladen NIET van de ene plaats naar de andere. Verwijder altijd het deksel en leeg het waterreservoir voordat u het naar een andere locatie verplaatst.

Transport- en opslagomstandigheden: -20 °C - 55 °C, vochtigheid ≤ 95%, druk 70-106 kPa.

Bedrijfsomstandigheden: 5-40 °C, luchtvochtigheid 30-80%, druk 80 kPa - 106 kPa.

Technische gegevens

Ingangsspanning: 24 V

Vermogen: 13 W

Bevochtigingsmodus: 2,4 MHz ultrasone cel

Capaciteit waterreservoir: 500 ml

Geluidsniveau: <35 dB

Adapter: ingang 100-240 V~ 50/60 Hz

Waterbestendigheid: IPX0

Afmetingen apparaat: 168 x 121 mm

Gewicht: ca. 520 g

Voorzorgsmaatregelen

Lees en volg de volgende instructies:

- Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met overspanningsbeveiliging en aarding.
- Zet het apparaat altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond. Leg er geen kussen of deken onder, want dat blokkeert de ventilatieopeningen aan de onderkant, waardoor het apparaat oververhit raakt en kapot gaat.
- Vul nooit meer water dan de "MAX"-markering.
- Voeg niet meer zout toe aan het water dan aanbevolen. Meer zout geeft geen sterker gezondheidseffect! Breng meer tijd door in de zoutstoom voor een sterker effect!
- Het gebruik van een te geconcentreerde zoutoplossing (meer zout dan aanbevolen) versterkt het effect niet, maar leidt tot een storing van het apparaat (het zout zal zich op de ventilator afzetten en ervoor zorgen dat deze niet meer kan draaien).
- Gebruik natuurlijk en additiefvrij steenzout, zoals Parajdi of Himalaya-steenzout.
- Gebruik geen zeezout, zout dat jodium bevat of andere toevoegingen!
- Schakel het apparaat niet in als de tank leeg is.
- Volg de onderhoudsinstructies en reinig het apparaat regelmatig om storingen te voorkomen.
- Koppel altijd de stroomtoevoer los voordat u onderhoud uitvoert.
- Giet na gebruik het resterende water uit de "AFVOERKANT" van de tank en veeg het apparaat droog met een schone, droge doek.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen en airconditioning.
- Kantel het apparaat niet, omdat er dan water in de bodem kan komen en een storing kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 10 uur achter elkaar. Wacht 60 minuten voordat u het apparaat opnieuw start om schade aan de ultrasone cel te voorkomen.
- Voeg geen etherische oliën of aromatherapeutische stoffen toe. Chemische geurstoffen, kruiden of onzuiverheden veroorzaken storingen.
- Gebruik alleen kraanwater, geen mineraalwater, bruisend water, Salvus-water of spa-water, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
- Het gebruik van gedestilleerd water is niet nodig, maar kan worden gekozen om kalkaanslag te verminderen en het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Raak geen enkel onderdeel van het product aan met natte handen.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- De kabel mag geen looppaden kruisen en er mag nooit op enig punt een sterke trekkracht op worden uitgeoefend.
- Als u een brandlucht ruikt, koppel het apparaat dan onmiddellijk los.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat in gebruik is.
- Haal de stekker uit het stopcontact in geval van storm, stroomstoot of stroomuitval, omdat de terugstroom elektrische onderdelen kan beschadigen.

Problemen oplossen

Als het apparaat niet goed werkt, controleer dan het volgende:

Storingsvrij	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
Schakelt niet in - schakelt te vroeg uit	- Is er voldoende water in de tank? - Is de stroomkabel correct aangesloten?	- Vul de tank met water - Koppel de kabels los en controleer ze, sluit ze vervolgens zorgvuldig weer aan.
Geen of abnormale nevel	- Te weinig water - Te veel water - Is de ultrasone cel vervuild? - Zijn de bekleding en binnenbekleding verkeerd geïnstalleerd? - Is de luchtinlaat aan de onderkant van het apparaat om een of andere reden geblokkeerd?	- Vul voldoende water bij. - Vul de watertank nooit boven de MAX-lijn. - Raadpleeg de onderhoudsinstructies voor het correct reinigen van de ultrasone cel. - Verwijder het en plaats het opnieuw op de juiste manier om ervoor te zorgen dat de dampvorming niet wordt belemmerd. - Reinig of ontstop de inlaatopening. - De beperkte luchtstroom heeft invloed op de dampvorming.
Er lekt water uit het apparaat	- Zijn de bekleding en binnenbekleding verkeerd geïnstalleerd? - Is het apparaat omgevallen? - Lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid?	- Verwijder het en plaats het opnieuw op de juiste manier om ervoor te zorgen dat de dampvorming niet wordt belemmerd. - Volg de instructies voor het omgaan met gemorste vloeistoffen. - Onder deze omstandigheden condenseert de condensatie snel tot waterdruppels.

Let op

De hoeveelheid en intensiteit van de geproduceerde damp varieert, maar dit wordt niet als een storing beschouwd. Factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid nevel zijn onder andere de hoeveelheid water in de tank, de luchtvochtigheid en temperatuur in de kamer en de luchtstroom.

Als er geen water in de tank zit, geeft het apparaat drie piepjes wanneer u op de MIST-knop drukt om u eraan te herinneren water bij te vullen. Het apparaat werkt niet zonder water.

Als het apparaat tijdens het gebruik omvalt, volg dan de onderstaande stappen om storingen te voorkomen.

- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het deksel.
- Giet het resterende water uit de watertank.
- Schud het apparaat voorzichtig om eventueel water uit de behuizing te verwijderen en laat het vervolgens minimaal 24 uur drogen.

Garantie

De garantieperiode voor het SaltDome-apparaat is 24 maanden vanaf de aankoopdatum. De garantieperiode voor de voedingsadapter is 6 maanden.

Voor reparaties binnen of buiten de garantieperiode brengt u uw apparaat naar (of stuurt u het naar) een servicecentrum.

Adres: Scart Ltd - Service. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Doe het altijd in de verpakking:

- Apparaat
- voeding
- afstandsbediening (indien u deze gebruikt)
- beschrijving van de fout
- kopie van de factuur
- retouradres
- telefoonnummer (om contact met u op te nemen in geval van vragen)
- e-mailadres (om contact met u op te nemen in geval van vragen)
- als het apparaat niet meer onder de garantie valt, geef dan aan of u het zeker wilt laten repareren of vraag een offerte aan voor de verwachte kosten

Klantenservice:

Scart Ltd.

2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Tel: +36 53

info@medimarket.hu - www.medimarket.hu